

Gebruiksaanwijzing

Voor optiekkorf, zeefbakken en instrumentbevestigingen

Productvoorbeelden

Optiekkorf



Optiekkorf met deksel en instrumentbevestiging




Instrumentennet



Spoelkorf voor kleine delen



Optiekkorf met instrumentbevestiging

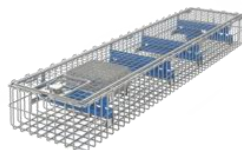

Instrumentbevestiging 1-2-3-Rack



Doel

De optiekkorf, het instrumentennet of de instrumentbevestiging wordt gebruikt voor het transport tijdens de behandeling, inclusief de sterilisatie, voor de opslag en voor de uitgifte van medische instrumenten.

Het product kan worden gebruikt door medische professionals en leken na instructie van medische professionals.

Het laadvermogen is beperkt tot max. 15 kg. De maximaal toegestane temperatuur is beperkt tot 150 °C.



Het product voldoet aan de eisen van de verordening betreffende medische hulpmiddelen (EU) 2017/745 en is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel van Klasse I.



www.hupfer.com

Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING – verbrandingsgevaar

Het product wordt verwarmd tijdens het reinigen, desinfecteren en steriliseren. Bij aanraking met het hete product bestaat verbrandingsgevaar.

- ▶ Draag thermisch isolerende veiligheidshandschoenen.
- ▶ Laat het product voldoende afkoelen.



WAARSCHUWING – infectiegevaar

Het product kan verontreinigde instrumenten vervoeren. Er bestaat een infectiegevaar bij aanraking van besmette instrumenten.

- ▶ Draag geschikte veiligheidshandschoenen.
- ▶ Behandel het product voorzichtig.



WAARSCHUWING – verbrandingsgevaar

Beschadigde producten hebben scherpe randen. Er bestaat gevaar voor verwondingen aan scherpe kanten.

- ▶ Controleer het product regelmatig.
- ▶ Gooi beschadigde producten weg.



VOORZICHTIG – gevaar voor verwondingen

Losse instrumenten en inzetstukken kunnen tijdens het transport eruit vallen en letsel veroorzaken.

- ▶ Neem het inlaadschema in acht.
- ▶ Sluit het product af.

Instructies voor de behandeling

Steriel na behandeling

Voor gebruik moet het product worden behandeld met de stappen reiniging, desinfectie en sterilisatie.

Er mogen geen resten van reinigings- of ontsmettingsmiddelen aan het steriele product blijven kleven.

Opmerkingen over reinigingsmiddelen

Contact met de volgende stoffen vermindert de levensduur van het product en kan de steriliteit na behandeling in gevaar brengen:

- Zout- en zwavelhoudende stoffen
- Chloriden (zout)
- Externe roest, bijv. verontreinigingen door de behandeling

Volg bij het reinigen, desinfecteren en steriliseren de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het reinigingsmiddel. Verdere reinigings- en onderhoudsinstructies zijn te vinden op www.hupfer.com/downloads.

Rapporteer ernstige incidenten in verband met het product aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit.