

Manual de instrucciones

Para cestas de inmersión, bandejas de colador y fijaciones de instrumentos

Ejemplos de productos

Cesta de inmersión



Cesta de inmersión con tapa y fijación de instrumentos



Bandeja de inmersión



Bandeja de inmersión para piezas pequeñas



Bandeja de inmersión para endoscopio con fijación de instrumentos



Fijación de instrumentos 1-2-3-Rack



Finalidad

La cesta de inmersión, la bandeja de inmersión o la fijación del instrumento se utiliza para el transporte durante el acondicionamiento, incluida la esterilización, para el almacenamiento y la puesta a disposición de instrumentos médicos.

El producto puede ser utilizado por profesionales médicos y por legos en la materia que hayan recibido previamente instrucciones por parte de profesionales médicos.

La carga útil se limita a un máximo de 15 kg. La temperatura máxima permitida se limita a 150 °C.



El producto cumple con los requisitos del reglamento sobre productos sanitarios (UE) 2017/745 y está clasificado como producto sanitario de Clase I.



www.hupfer.com

Indicaciones de seguridad



ADVERTENCIA - Peligro de quemaduras

El producto se calienta durante su limpieza, desinfección y esterilización. Existe peligro de quemaduras en caso de contacto con el producto caliente.

- ▶ Use guantes protectores con aislamiento térmico.
- ▶ Deje que el producto se enfríe lo suficiente.



ADVERTENCIA - Peligro de infección

El producto puede transportar instrumentos contaminados. Existe peligro de infección en caso de contacto con instrumentos contaminados.

- ▶ Use guantes protectores apropiados.
- ▶ Maneje el producto con cuidado.



ADVERTENCIA - Peligro de lesiones

Los productos dañados tienen bordes afilados. Existe peligro de lesiones en caso de contacto con los bordes afilados.

- ▶ Revise el producto regularmente.
- ▶ Elimine los productos dañados.



PRECAUCIÓN - Peligro de lesiones

Los instrumentos y las plantillas sueltas pueden caerse durante el transporte y causar lesiones.

- ▶ Observe el diagrama de montaje.
- ▶ Selle el producto.

Instrucciones de acondicionamiento

Estéril después del acondicionamiento

Antes de su uso, el producto debe ser acondicionado con los pasos de limpieza, desinfección y esterilización.

Ningún residuo de agentes de limpieza o desinfectante debe adherirse al producto estéril.

Notas sobre los agentes de limpieza

El contacto con las siguientes sustancias reducirá la vida útil del producto y podría poner en riesgo la esterilidad después del acondicionamiento:

- Sustancias con contenido de sal y azufre
- Cloruros (sal)
- Óxido externo, como p. ej. impurezas a causa del acondicionamiento

Cuando limpie, desinfecte y esterilice, siga las instrucciones de uso del fabricante del agente de limpieza. En www.hupfer.com/downloads encontrará más instrucciones de limpieza y cuidado.

Notifique al fabricante y a las autoridades competentes acerca de cualquier incidente grave relacionado con el producto.