

## Istruzioni per l'uso - Alzata per sala operatoria



Alzata per sala operatoria a 1 gradino

Alzata per sala operatoria a 2 gradini

Dotata di piedini antiscivolo e antistatici.

### Uso previsto

L'alzata per sala operatoria serve come piattaforma per stare in piedi vicino a tavoli o scaffali. Sull'alzata per sala operatoria può essere posizionato un carico massimo di 150 kg.

I danni derivanti da un uso improprio comportano la perdita della responsabilità e dei diritti di garanzia.

### Avvertenze di sicurezza

L'alzata per sala operatoria può essere utilizzata su pavimenti asciutti e piani. Salire sull'alzata per sala operatoria solo con scarpe antiscivolo.

C'è il rischio di scivolare su superfici umide e bagnate. Pulire e asciugare immediatamente le superfici umide e bagnate.

I gradini che si trovano lungo i percorsi costituiscono un pericolo di inciampo. Conservare i gradini inutilizzati in modo sicuro.

L'alzata per sala operatoria deve essere utilizzata solo in condizioni tecnicamente perfette, in condizioni di sicurezza e di consapevolezza dei rischi, conformemente all'uso previsto e nel rispetto delle istruzioni d'uso.

### Targhetta identificativa

La targhetta identificativa si trova prima del 1° gradino, a destra.



- |   |                         |   |        |
|---|-------------------------|---|--------|
| 1 | Costruttore e indirizzo | 4 | Peso   |
| 2 | Designazione del tipo   | 5 | Carico |
| 3 | Numero d'ordine         |   |        |

### Pulizia

#### **i** ATTENZIONE

#### Acciaio inox: detersivi non corretti

Le superfici in acciaio inox dell'apparecchio possono essere danneggiate da una manipolazione scorretta e può formarsi della ruggine. Pertanto, adottare le seguenti precauzioni durante il lavoro con l'apparecchio:

- ▶ Per la pulizia, non utilizzare mai: detersivi clorurati, polveri abrasive o altri detersivi a secco o lana, spugne d'acciaio e/o oggetti con spigoli.
- ▶ Leggere le istruzioni speciali per la cura dell'acciaio inox e seguire le istruzioni ivi contenute. È possibile scaricare le istruzioni per la cura al sito: [www.hupfer.com/downloads](http://www.hupfer.com/downloads)



### AVVISO

#### Detersivi adatti

Il costruttore non può valutare l'idoneità di specifici detersivi o disinfettanti.

- ▶ Controllare le informazioni sui detersivi/disinfettanti per vedere se sono adatti ai materiali del prodotto.
- ▶ In caso di dubbio, chiedere al produttore del detersivo se quest'ultimo è adatto ai materiali.
- ▶ Pulire e disinfettare le superfici dell'apparecchio dopo l'uso o secondo necessità.
- ▶ Per la pulizia a umido utilizzare un panno morbido o una spugna non rivestita.
- ▶ Utilizzare detersivi liquidi sgrassanti.
- ▶ Disinfettare con i disinfettanti disponibili in commercio.

Controllare annualmente i collegamenti a vite. Se necessario, serrare nuovamente i collegamenti a vite.