

# Mode d'emploi

## Pour paniers perforés, passoires et fixations d'instruments

### Exemples de produits

Panier perforé pour instruments



Panier perforé avec couvercle et fixation d'instruments



Passoire à instruments



Panier perforé pour petites pièces



Panier perforé pour endoscopes avec fixation d'instruments



Fixation d'instruments Rack 1-2-3



### Usage prévu

Le panier perforé, la passoire à instruments ou la fixation des instruments servent au transport pendant le traitement, y compris la stérilisation, pour le stockage et pour la mise à disposition d'instruments médicaux.

Le produit peut être utilisé par les professionnels de la santé et les profanes après instruction effectuée par des professionnels de la santé.

La charge utile est limitée à 15 kg maximum. La température maximale autorisée est limitée à 150 °C.



Le produit est conforme aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et est classé comme dispositif médical de classe I.



[www.hupfer.com](http://www.hupfer.com)

### Consignes de sécurité



#### AVERTISSEMENT - Risque de brûlures

Le produit est chauffé pendant le nettoyage, la désinfection et la stérilisation. Tout contact avec le produit chaud entraîne un risque de brûlure.

- ▶ Portez des gants de protection thermo-isolants.
- ▶ Laissez le produit refroidir suffisamment.



#### AVERTISSEMENT - Risque d'infection

Le produit peut transporter des instruments contaminés. Tout contact avec des instruments contaminés entraîne un risque d'infection.

- ▶ Portez des gants de protection appropriés.
- ▶ Manipulez le produit avec précaution.



#### AVERTISSEMENT - Risque de blessures

Les produits endommagés ont des bords tranchants. Les bords tranchants entraînent un risque de blessures.

- ▶ Vérifiez régulièrement le produit.
- ▶ Éliminez les produits endommagés.



#### ATTENTION - Risque de blessures

Les instruments et les inserts mal fixés peuvent tomber pendant le transport et causer des blessures.

- ▶ Veuillez respecter le schéma de chargement.
- ▶ Fermez le produit.

### Consignes de traitement

#### Stérile après traitement

Avant l'utilisation, le produit doit être traité conformément aux étapes de nettoyage, de désinfection et de stérilisation.

Aucun résidu de produit de nettoyage ou de désinfectant ne doit adhérer au produit stérile.

#### Indications concernant les produits de nettoyage

Le contact avec les substances suivantes réduit la durée de vie du produit et peut mettre en danger la stérilité après le traitement :

- Substances contenant du sel et du soufre
- Chlorures (sel)
- Rouille erratique, par exemple des impuretés provenant du traitement

Pour le nettoyage, la désinfection et la stérilisation, suivez les instructions d'utilisation du fabricant du produit de nettoyage. Des instructions de nettoyage et d'entretien supplémentaires sont disponibles sur le site [www.hupfer.com/downloads](http://www.hupfer.com/downloads).

Signalez au fabricant et à l'autorité compétente les incidents graves liés au produit.